


Hygieneseil 25075

Spesifikasjoner

Stoff: Nylon, Kordfløyel i bomull
 Kantbånd: Polyester
 Max-last: 180 kg
 Størrelser: S, M, L, XL
 Vaskeråd: Se etikett på løfteseil
 EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts

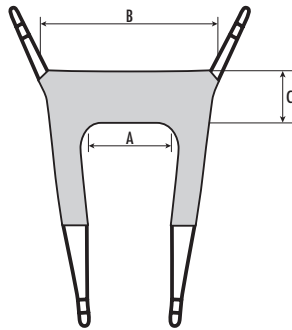

Størrelse		Fargekode	A	B	C
S	Small	Rød	42	79	25
M	Medium	Gul	44	85	27
L	Large	Grønn	47	92	29
XL	Extra large	Blå	52	101	32



Human Care Norge AS, Furuveien 11, NO-2020 Skedsmokorset
 Tel 63 87 78 13 • Fax 63 87 78 17 • E-post: post@hcn.no • www.hcn.no

040301-090N



Hygieneseil 25075



CE


Human Care Hygieneseil 25075 brukes fremfor alt i forbindelse med toalett-
 besøk. Den egner seg best for pleiemottageren med god stabilitet i overkroppen
 da åpningen nedentil er relativt stor. Seilet er lite og smidig noe som gjør at den
 er lett å ta på og av.

25075 er tilpasset for trepunkts opphenging.

Viktig!

⚠ Løft og forflytting av en person innebærer alltid en risiko. Les derfor nøye
 igjennom bruksanvisning for både løfter og løftetilbehøret. Forviss deg alltid om at det
 løftetilbehøret du anvender, fungerer sammen med løfteren. Som pleier/medhjelper er du
 ansvarlig for pleiemottagerens sikkerhet og du må kjenne til vedkommendes mulighet
 til å tåle løftesituasjonen. Ved usikkerhet kontakt leverandøren.

Løft fra liggende

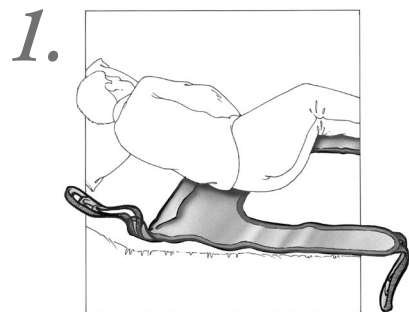


Legg pleiemottageren på siden. Før inn seilet slik at midten havnar langs ryggraden. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Rull pleiemottageren over på den andre siden og dra fram seilet. Legg pleiemottageren på ryggen. Dersom sengen er hev- og senkbar kan du med fordel heve hodedelen slik at pleiemottageren kommer opp i halvt sittende.




Dra fram bendelene mellom pleiemottagerens ben. Om pleiemottageren skal på toalettet, kan du allerede nå kneppe opp buksene. Senk løfteren ned i høyde med magen. Dersom man ønsker det kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt på bendelenes løftestopper i løfterens benkrok. Vend løfteren og hekt ryggdelens løftestopper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkt oppheng. Hempen på den høyrebendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.

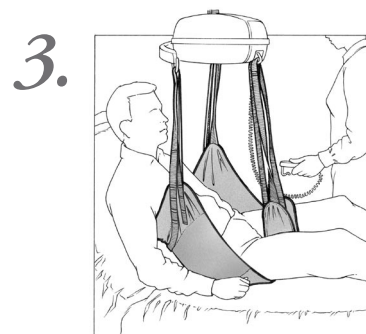

Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.

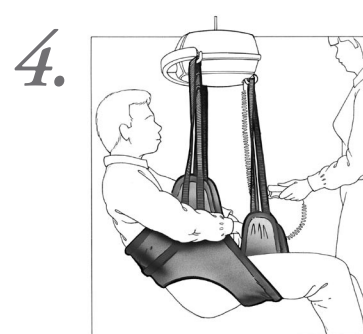

Fortsett løftet. Det kan bli nødvendig å senke sengen noe. Løft litt i pleiemottagerens ben samtidig som du vrir ham fra sengen. Dersom du er ved toalettet, kan du dra ned buksene så langt det går mens pleiemottageren sitter i seilet. Senk ham deretter ned på toalettet og kjør løfteren ned i magehøyde og hekt av bendelene (dersom pleiemottageren kan sitte uten støtte, ta seilet helt bort). Kjør opp løfteren over pleiemottagerens hode. Dra buksene helt ned. Pleiemottageren kan nå bli sittende med seilet som støtte.

Løft fra sittende




Før seilet ned bakom ryggen. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Dra fram seilets bendeler.




Dra seilets bendeler opp mellom pleiemottagerens ben. Senk løfteren ned i høyde med magen. Om ønskelig kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt bendelenes løftestopper på løfterens benkrok. Snu løfteren og hekt ryggdelens løftestopper på galgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkt oppheng. Hempen på den høyrebendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.

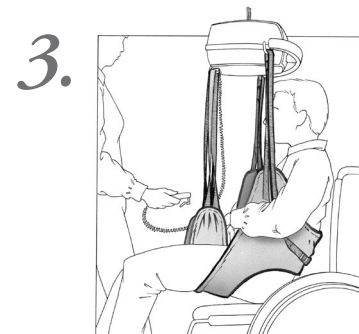

Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.

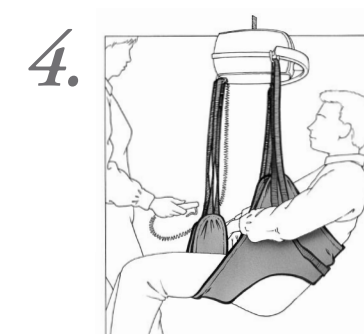

Fortsett løftet. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflyttingen da det skaper en større trygghet. Dersom du er ved toalettet, gjør på samme måte som i løft fra liggende.